



Järven Plast & Smide AB

Waschanleitung und Desinfektion von Järven - Evakuierungstüchern

Zur Infektionsprophylaxe empfehlen wir eine Wischdesinfektion (s.u.). Wenn das Evakuierungstuch stark verschmutzt ist folgen Sie der Waschanleitung.

Waschanleitung für Artikel #9902 :

Max 90° C gilt für die Farbe blau. Max 70° C gilt für die Farbe rot (nicht mehr lieferbar).

Eine thermische Desinfektion mittels VDV-Anlage (bis 105° C) kann bei Kontamination mit bestimmten Erregern (z.B. MRSA) durchgeführt werden.

Waschanleitung für Artikel #9902 Flotex :

Max 90° C.

Achtung: In keinen Fall dürfen **Weichspüler** benutzt werden, da dadurch die Lebensdauer der Beschichtung reduziert wird.

Vor dem Waschen Klettverschlüsse aufeinander legen, dadurch verhindert man das das Evakuierungstuch oder andere Textilien zerstört werden und der Flausch von anderen Textilien auf dem Klettverschluss haften.

Waschen Sie bitte die Evakuierungstücher separat oder im Wäschebeutel. Verwenden Sie keine Wäschepresse zum trocknen. Die Beschichtung könnte sich vom Trägermaterial lösen.

Desinfektion:

Als Desinfektionsmittel empfehlen wir bei praxisorientierten gebrauchsfertigen Anwendungskonzentrationen z.B. Meliseptol, Spitacid, Softasept, Softaman, Biguamed oder Perform.

(Nicht – abtrocknen! Nicht mit klarem Wasser nachwischen!)

Bei einer Schlussdesinfektion muss die vorgeschriebene Einwirkzeit eingehalten werden.

Desinfektionslösungen mit Alkohol kann eine austrocknende Wirkung auf die Folie haben und soll deswegen sparsam verwendet werden.

Achtung: Zur Desinfektion und Reinigung der Evakuierungstücher dürfen auf keinem Fall chlorhaltige Mittel oder Peressigsäure benutzt werden.

ppm – marburg

peter pohl medizintechnik
Graf-von-Stauffenberg-Str. 47
35037 M a r b u r g (Lahn)
info@ppm-marburg.de

Telefon: (0 64 21) 93 19 18
Fax : (0 64 21) 3 32 05
USt-IdNr.: DE 188144457

Sparkasse Marburg-Biedenkopf
IBAN: DE33 5335 0000 0020 0006 78
BIC: HELADEF1MAR